


# Håndtering af hysteroskop

## Indhold

- Gubinni, bipolarært miniresektoskop - samling af hysteroskopet (s.1-3)
- Gynko - samling af fleksibelt sterilt engangsheat (s.4)
- Indstillinger af hysteroskopisøjlen i gyn amb. (s.5)


## Samling af hysteroskop - rækkefølge:

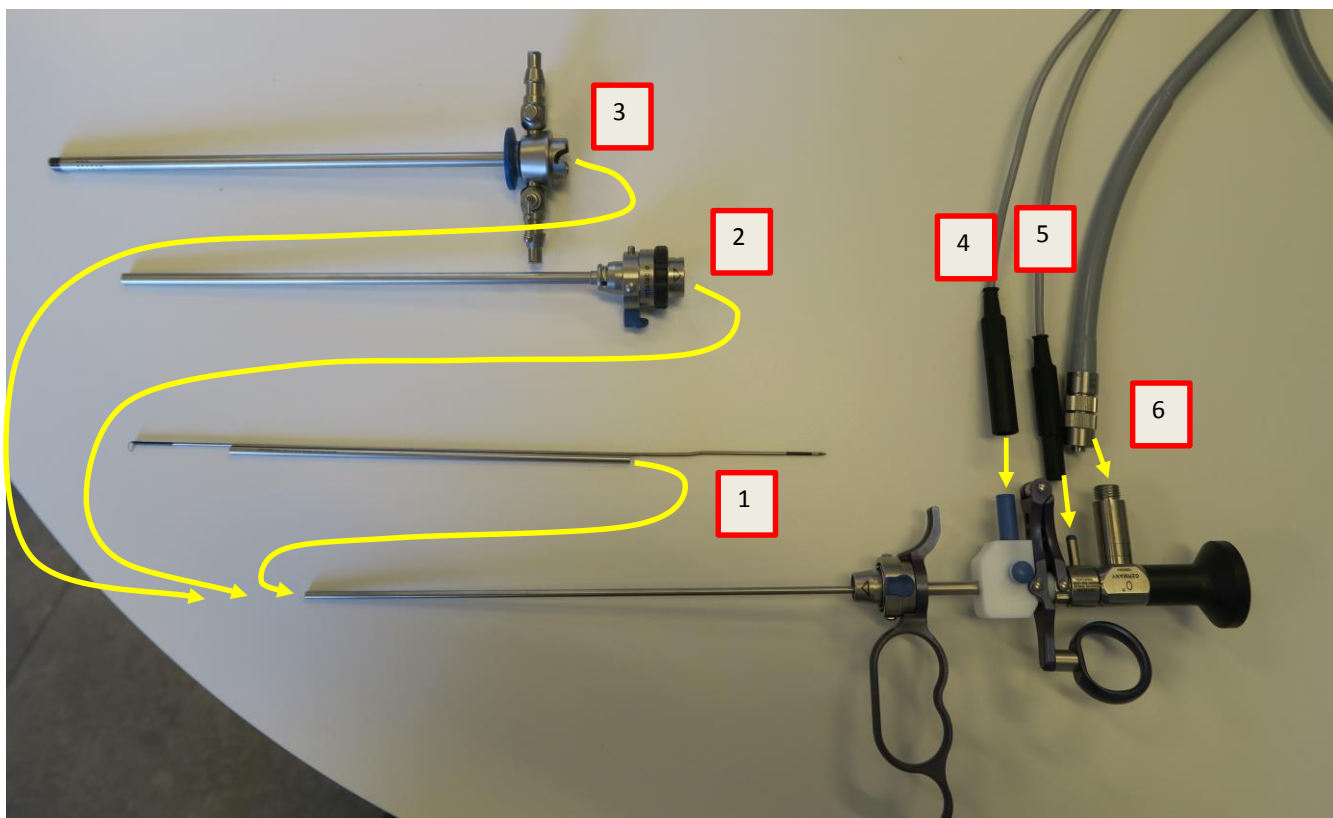


# Gubinni, bipolarært miniresektoskop

## Samling af hysteroskopet :


1. Find det arbejdsinstrumentet der skal bruges (kuglen/slyngen/mv.)

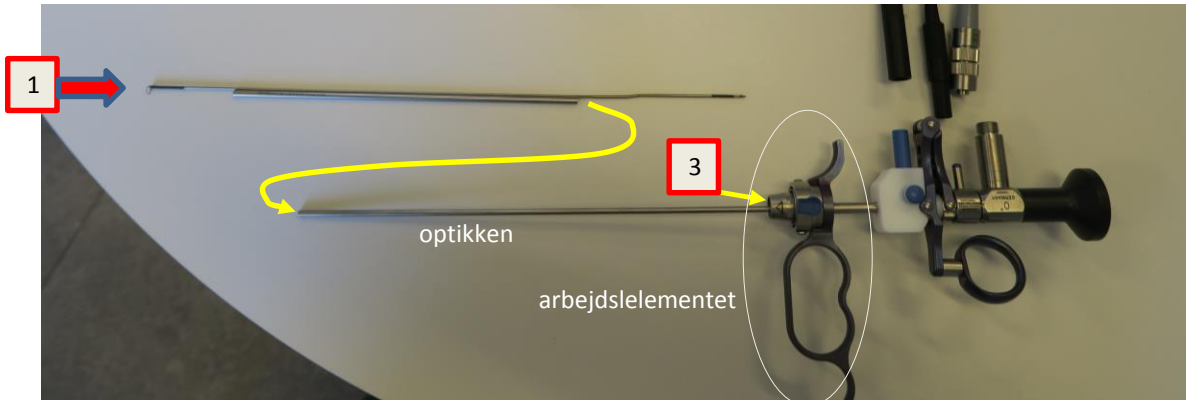



2. Lad røret på instrumentet glide ind over optikken (gul pil)

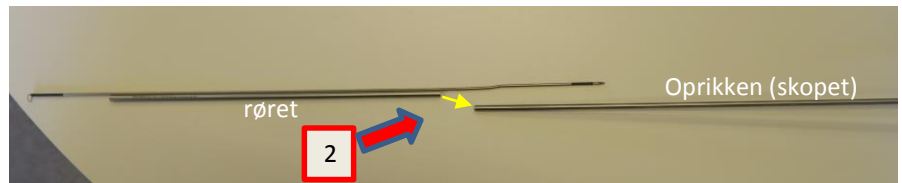

3. Elektroden skal placeres i hullet øverst i arbejds-elementet (elektroden trykkes forsigtigt ind til det giver et lille klik)

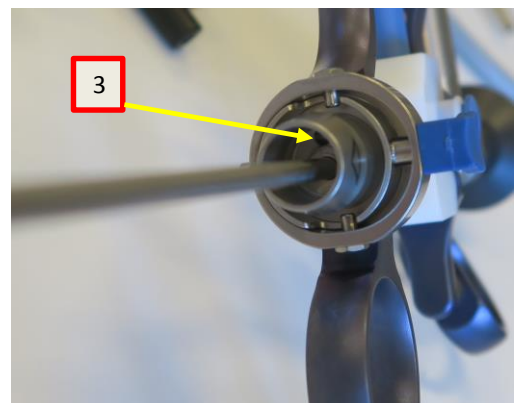


4. Yderrøret føres hen over
5. inderrøret,
6. der i samlet stand føres ind over optikken og monteres på arbejdslelementet

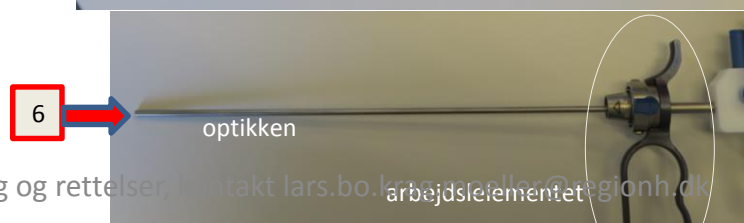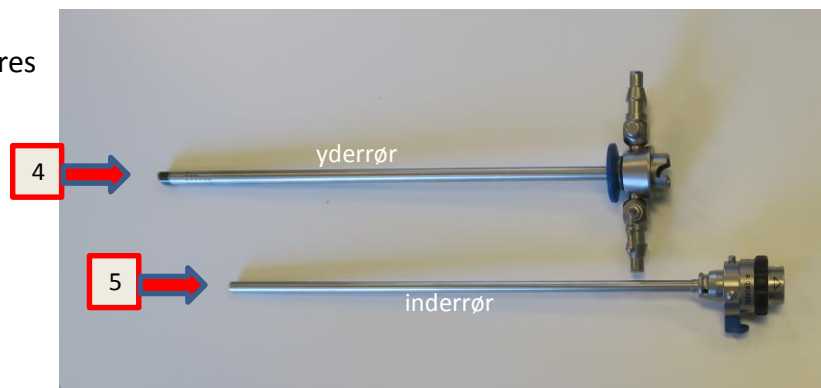

## Lys, strøm og vand tilkobles nu:


1. Lys
2. Strøm (2 ledninger)
3. Vand (bemærk at in/out flow er markeret med pile ved hanerne)

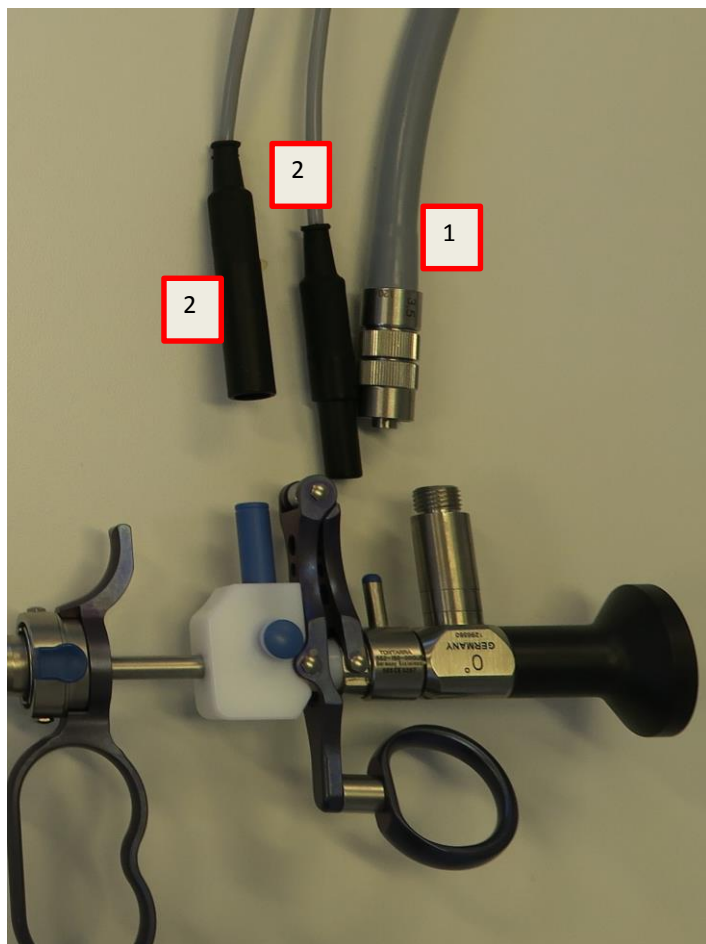



# Gynko

## Samling af fleksibelt sterilt engangs sheath


1. Indfør skopet således at lyskanalen på skopet (a) vender modsat instrumentkanalerne (b).

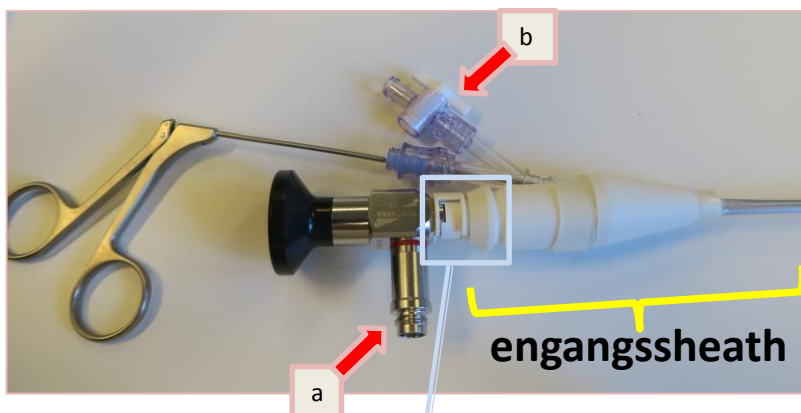

2. Sørg for at den lille hvide låsering på låsen er drejet som på billedet (åbningen i låseringen (d), placeres ud for åbningen i låsen (c))
3. Pres nu skopet forsigtigt ind i engangssheathet: Drej evt. lidt på skopet, til det "går i hak" (se punkt 1).

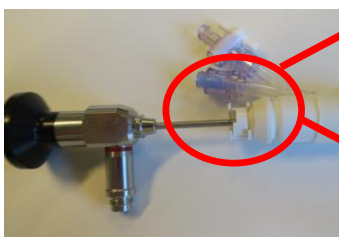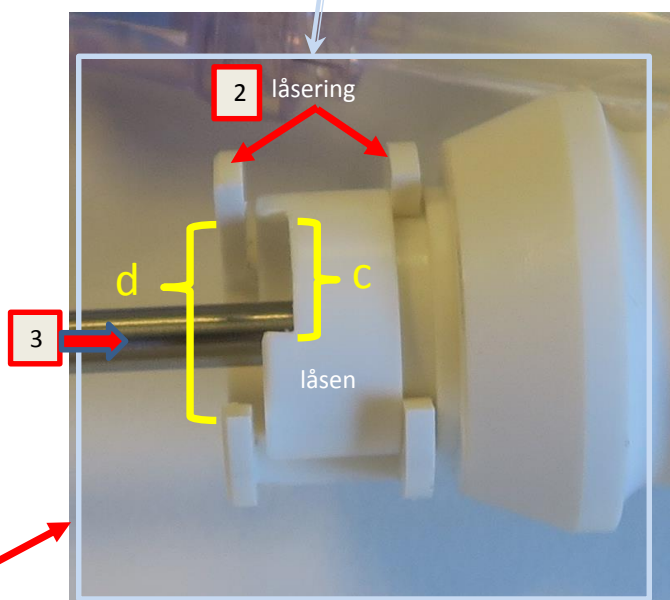

4. Drej låseringen ca 180 grader, for at låse skopet til indføringsrøret

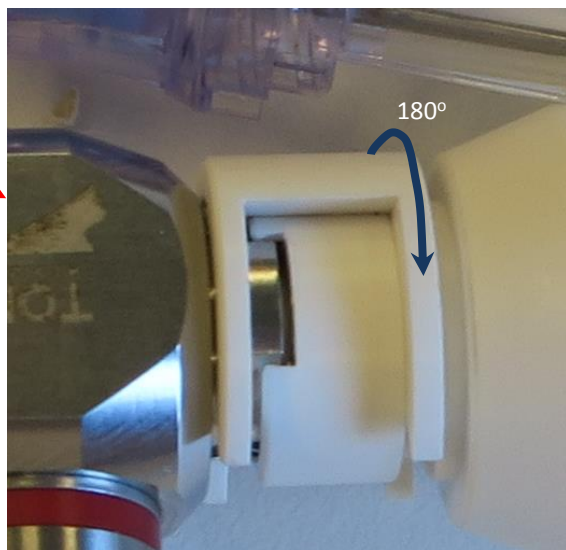

# Hysteroskopi søjlen i gyn amb. Indstillinger

